

採便方法

ご注意

必ず、排尿を済ませてから次の作業に取り掛かってください。




1 採使用シートを置いて、排便

採使用シートは和式・洋式どちらの便器にも使えます。
シートに印刷されている「使用上の注意」をよく読んでから準備してください。
※自動洗浄トイレの場合、先に「自動洗浄機能」を止めてください。



2 採便

1. 保存容器の蓋を開けます。
2. 採便棒を袋から取り出し、便の場所を変えながら先端部を数か所に突き刺し、米粒程度の便を付着させてください。
※保存容器の液体（グアニジン溶液）は誤って触れた場合、瞬時に害を与えるものではありませんが、速やかに水洗してください。

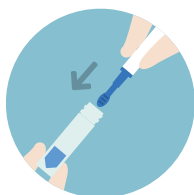

3 便を容器に保存する（1）

先端部が溶液に浸かるように採便棒を保存容器に差し込みます。



4 便を容器に保存する（2）

ボールペンのペン先を出す要領で押し出し棒を押し、先端部を保存容器の中で外します。



5 便を容器に保存する（3）

先端部を残したままで蓋をしっかりと閉め、便が保存溶液にしっかりと浸かっている状態で容器の上部をつまんで持ち、液が濁る程度まで左右に振ります。
蓋が閉まっていることをもう一度確認してから、チャック付きポリ袋に入れます。
棒の持ち手部分は燃えるゴミとして廃棄してください。



6 採便から 1 週間以内に投函してください

返送用封筒に、チャック付きポリ袋に入れた保存容器、同意書、および問診票を入れてください。

※保存容器は常温で 2 週間保管できるように設計されていますが、夏の暑い時期は、日中のポスト投函はできるだけ避けてください。なるべく直接郵便局へ出すか、夜間に投函していただきますよう、お願いいたします。